

## FICHE TECHNIQUE

MASQUE FFP2

MS-510675

*Masque filtrant destiné à protéger le porteur contre les risques d'inhalation d'agents infectieux transmissibles par voie aérienne. Il le protège a fortiori aussi contre le risque de transmission par gouttelettes.*

*Durée d'utilisation : entre 3 et 8 heures*



### Conforme à la directive Européenne R2016/425/EC

- Testé selon la norme  
EN 149:2001 + A1:2009  
KN95
- Efficacité de filtration  
bactérienne  
(EFB) > 95%

### Conditionnement :

- Boîte de 10 pièces
- Carton : 1000 (100 boîtes x 10)

### Caractéristiques Générales

- Couches de fibres non tissées en polypropylène.
- Barrette nasale : Aluminium
- Couche de confort et d'étanchéité sous barrette nasale en polypropylène.
- Elastique de maintien double, sans latex
- Usage unique
- Sans soupage
- Taille unique, adaptée à la morphologie d'un visage adulte
- Très léger, très doux et confortable, il est facilement accepté et porté par l'utilisateur.
- Offre une excellente adaptation au visage et de ce fait un excellent niveau de protection.
- Sans Latex, Silicone ni PVC, il est constitué de matières anallergiques.

### Précautions d'emploi :

- Une fois mis en place, le masque ne doit plus être touché.
- Une fois enlevé, il ne doit pas être réutilisé.
- Il doit être changé immédiatement, chaque fois qu'il est souillé, mouillé, ou mal positionné sur le visage.
- Procéder à une hygiène des mains après avoir mis le masque et après l'avoir enlevé.
- Ne pas le conserver autour du cou.
- Eliminer le masque après utilisation.



### Conseils de stockage :

Stocker dans son emballage à l'abri de la lumière et de l'humidité  
Le délai de péremption est de 2 ans à compter de la date de fabrication